

医療機器の洗浄を強力サポート

# Vete-Fresh

ヴェテフレッシュ



血液が付着した外科用鋼製器具や  
粘液が付着した内視鏡を  
タンパク質分解酵素の力で  
きれいにする洗浄剤です

※ 2回のプッシュで100倍希釈液が約1L作れます

## タンパク質分解効果比較

犬  
血液  
汚染物

	10分後	20分後	30分後
未処理			
Vete-Fresh			
台所用中性洗剤			
水道水			

調査協力  
日本獣医生命科学大学  
石岡克己先生

みずほ台動物病院・琉球動物医療センター  
兼島 孝先生

## 使用方法

- 希釈してお使いください。
- ・使用濃度：50～200倍希釈  
(推奨濃度：100倍希釈)
- ・1回プッシュ量：約4mL
- ※水温40～45℃で酵素が活性化され、  
より洗浄効果が高まります。
- ※洗浄後は必ずスギが必要です。

## 性状

外観：緑色透明液体 pH：中性  
成分：非イオン系界面活性剤(ポリオキシアルキレン)  
蛋白分解酵素(プロテアーゼ)  
多価アルコール類(グリセリン)  
金属腐食防止剤(カルボン酸塩)  
防腐剤、酵素安定化剤、ミント香料、  
着色料(緑色)、水

## 容量

1,000ml(1本入り)

●製品のご用命は

販売元 / 株式会社 **AVS**

東京 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1  
TEL 0800-600-2708 FAX 03-5738-3948



安全にお使いいただくために

ご使用前にラベル記載の「使用上の注意」  
をよくお読みの上、正しくお使い下さい。